







<b>FICHE TECHNIQUE : Déchets Médicaux</b>		
Désignation :	<b>Mini-collecteur 0.6L</b>	
Gamme :	<b>Mini</b>	
Référence	<b>ST07004</b>	
Date : 07/11/2019		

	<b>Dimensions :</b> 117 x 73 x 125 mm
	<b>Poids :</b> 91 gr
	<b>Matière :</b> PP
	<b>Volume total :</b> 0.63L / <b>Volume de remplissage :</b> 0.51L
	<b>Couleurs :</b> Jaune et blanc
	<b>Résistances :</b> Perforation et chute
<b>Caractéristiques :</b> Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes	

	<b>Conforme aux normes :</b>	
	NF EN ISO 23907-1 : 2019	
	Titulaire du label NF 302 (délivré par le LNE)	
	Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)	

Composition : Kit 2 pièces	Codes GTIN	
<b>Pièce 1 :</b> Cuve 0,6L, jaune avec étiquette 0.6L	GTIN Collecteur :	GTIN Carton :
<b>Pièce 2 :</b> Couvercle blanc avec trappe		
<b>Remarque :</b> Ensemble couvercle/trappe, à assembler sur la cuve par l'utilisateur.	3 701206 500000	3 701206 500109

Conditionnement :	
Nombre de pièces par carton : 80 pièces	Nombre de pièces par palette : 2240 pièces
Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400	Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h)
Poids du carton : 8.5 kg	Nombre de cartons par palette : 28 cartons
	Poids palette : 247 kg

Description et assemblage :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ;</li> <li>- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.</li> </ul>
<p>Etape 1 : Positionner le couvercle sur la cuve, de façon à ce que le languette du couvercle soit du même côté que l'étiquette de la cuve.</p> <p>Etape 2 : Appuyer sur le couvercle en son centre et clipper-le sur la cuve.</p> <p>Etape 3 : Sécuriser l'opération en appuyant sur chacun des 8 clips ( 2 par face)</p>

Accessoires / Options
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mini plateau de soins :</b> Réf ST04089 / Il permet d'apporter le collecteur au plus près du patient.</li> <li>- <b>Support plan antidérapant :</b> Réf. ST04097 / Fixation antidérapante sur plan / paillasse</li> <li>- <b>Support chariot universel :</b> Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco</li> <li>- <b>Support chariot universel avec crochet :</b> Réf ST04096C / Adapté à tous les collecteurs STIL'ECO</li> </ul>



ST04089



ST04097



ST04096



ST04096C