

Notice Illustrée

Gamme MINI

0.6L / 1.2L



ETAPE 1 / ASSEMBLAGE

Avant l'assemblage du produit, assurez-vous que le couvercle soit positionné du bon côté : la languette doit se trouver au-dessus de l'étiquette.



Appuyer sur le milieu du couvercle pour l'assembler sur la cuve, et assurez-vous que chaque petit clip est bien clipsé en appuyant dessus.
Il y en a 8 (2 par face !)

Fixer ensuite le collecteur sur le support sélectionné (obligatoire)



Vue latérale

ETAPE 2 / FERMETURE / OUVERTURE PROVISOIRE (Obligatoire entre chaque usage)

Pour fermer le collecteur, fermer la trappe en appuyant sur le **logo STIL'ECO** présent sur le couvercle, languette de manipulation vers l'arrière et appuyer.



Respecter toujours la limite de remplissage indiquée par la bande rouge sur l'étiquette

Limite de remplissage

Elle est là pour votre sécurité 😊

Pour rouvrir, appuyer sur la languette pour faciliter l'ouverture de la trappe (effet levier)



Pour dévisser

Pour embouts de stylos à insuline

ETAPE 3 / FERMETURE DÉFINITIVE Mon collecteur est plein



Plier la languette vers le bas

Refermer la trappe en **vérifiant que la languette rentre dans son logement**

Puis **presser fortement sur la trappe en un point central**

Le « clic » assure la fermeture définitive : la languette n'est plus accessible

