

# Notice Illustrée

## Gamme PACTO +

2L / 3L / 4.5L / 6.5L



### ÉTAPE 1 / ASSEMBLAGE

Avant l'assemblage du produit, assurez-vous que le couvercle soit positionné du bon côté :

**La languette doit se trouver au-dessus de l'étiquette.**



Exercer une pression sur **chacun des coins du couvercle** de façon à entendre un « clic ».  
Les « 4 clics » vous assurent que le couvercle est correctement fixé sur la cuve.

**Fixer ensuite le collecteur sur le support sélectionné (obligatoire)**



### ÉTAPE 2 FERMETURE / OUVERTURE PROVISOIRE Obligatoire entre chaque usage

Pour fermer le collecteur, fermer la trappe, languette de manipulation vers le haut et appuyer.



Appuyez sur l'empreinte digitale présente sur le couvercle pour vous aider à fermer le collecteur.



**UN CLIC ASSURE LA BONNE TENUE DE LA FERMETURE**

**Respecter toujours la**

**Limite de remplissage**

Elle est là pour votre sécurité ☺



En position fermeture provisoire, la languette est accessible.



**Pour rouvrir**, appuyer sur la languette pour faciliter l'ouverture de la trappe (effet levier)

### ÉTAPE 3 FERMETURE DÉFINITIVE Mon collecteur est plein !



Plier la languette vers le bas

Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement

Puis **presser fortement au niveau de la languette en un point central**

Le « clic » assure la fermeture définitive

**En position fermeture définitive, la languette est inaccessible.**

