

Notice Illustrée

Gamme PREMIUM

2L / 3L / 5L / 8L / 10L



ASSEMBLAGE

Avant l'assemblage du produit, assurez-vous que le couvercle soit positionné du bon côté : la languette doit se trouver au-dessus de l'étiquette.



Exercer une pression sur **chacun des coins du couvercle** de façon à entendre un « clic ».
Les « 4 clics » vous assurent que le couvercle est correctement fixé sur la cuve.

Fixer ensuite le collecteur sur le support sélectionné (obligatoire)

FERMETURE / OUVERTURE PROVISOIRE (Obligatoire entre chaque usage)

Pour fermer le collecteur, fermer la trappe, languette de manipulation vers le haut et appuyer.



Pour rouvrir, appuyer sur la languette pour faciliter l'ouverture de la trappe (effet levier)



Respecter toujours la limite de remplissage indiquée par la bande rouge sur l'étiquette

Limite de remplissage



Et rappelez-vous :

La fermeture provisoire est garante de la sécurité des utilisateurs ☺

FERMETURE DÉFINITIVE



Plier la languette vers le bas

Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement

Puis **presser fortement au niveau de la languette en un point central**

Le « clic » assure la fermeture définitive

