

LA FERMETURE PROVISOIRE

QUAND ? Entre chaque usage !

POURQUOI ? Pour sécuriser les utilisateurs
(les autres ET moi)

COMMENT ?

1. Lorsque mon soin est fini ; je plie la languette du collecteur vers l'arrière et je rabats la trappe jusqu'au clic.



Collecteur en fermeture provisoire

LA FERMETURE DÉFINITIVE

QUAND ? Une fois que la limite de remplissage est atteinte (ligne rouge)

POURQUOI ? Pour sécuriser les utilisateurs et les personnes en charge de l'élimination des déchets à risques infectieux.

COMMENT ?

1. Lorsque mon collecteur est plein ;
je plie la languette du collecteur et
je la rabats dans son logement.



Collecteur en fermeture définitive